

심프로(SYMPRO)

덴처 세척 장비

심프로는 덴처 및 교정 장치를 위한 고성능의 콤팩트한 세척 장비입니다.



" 왜 심프로가 효율적이나구요? 심프로의 세척 용기는 35° 각도로 기울어져 있기 때문에, 덴처가 세척액의 흐름과 반대 방향으로 움직이게 됩니다. 이때 세척용 핀에 충격이 가해지면서 최적의 세척이 가능하게 됩니다"

올리버 보테(Oliver Bothe)
프로덕트 매니저, 마스터 엔탈 테크니션

장점

- 구강 위생 용품으로 환자의 건강 상태를 증진시키고 충성도를 높임
- 100% 자동화 프로세스로 거의 노동 비용이 들지 않음
- 덴처 수리, 덴처 유지 보수, 덴처 리라이닝 하기 전 준비 시간을 절약해 줌

일을 간편하게

정기적인 관리와 세척으로 손상의 예방 및 조기 발견에 도움을 줍니다. 고품질 세척 작업이 가능한 역할을 수행하며, 쉽고 간편한 작동법으로 세척 과정이 편리합니다.

기술 정보

허용 메인 전압/주파수	100-240 V, 50/60 Hz
소비 전력	90 VA
회전 속도	1200 / 1600 / 2000 1/min
크기 (W x H x D)	150 x 240 x 280 mm
비커를 제외한 무게	약 3 kg

주문 정보

심프로 (100~240V)	No. 6500-0000
세척용 핀 (75g)	No. 6500-0550
심프로 유니버설 세척액 (2L x 2)	No. 6500-0600
심프로 니코클린 세척액 (2L x 2)	No. 6500-0610
환자 전용 브로셔 (50장, 영어)	No. 21-1092

구성품

심프로, 트위저 1개, 세척 용기 뚜껑, 후 처리 용기 및 뚜껑, 고정 마그넷, 세척용 핀

추가 정보

www.renfert.com/P1735





최적의 세척을 위한 세척 용기 각도



세척용 핀의 중요성

회전하는 자석은 세척용 핀이 움직이도록 하여 덴처 표면의 오염을 기계적으로 부드럽게 제거합니다. 세척용 핀은 회전하면서 세척액을 화학적 작용이 활발해지도록 약 45℃까지 가열시킵니다. 내산성 합금 소재의 세척용 핀은 내구성이 뛰어나고, 끝이 알맞은 각도로 깎여 있어 덴처에 손상을 주지 않습니다. 동시에 세척 효율성을 증가시키는 효과를 발휘합니다.

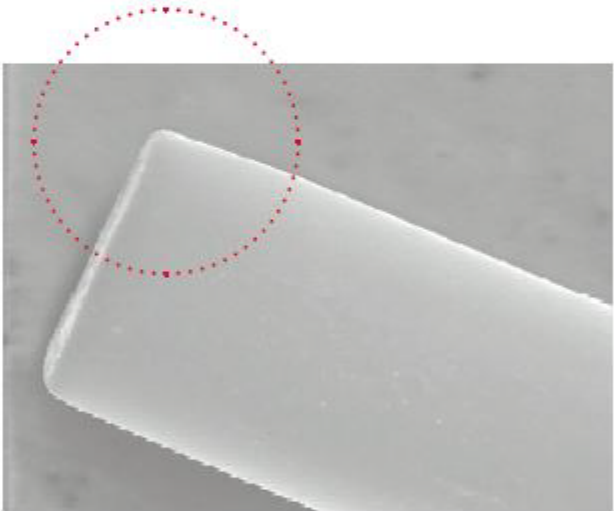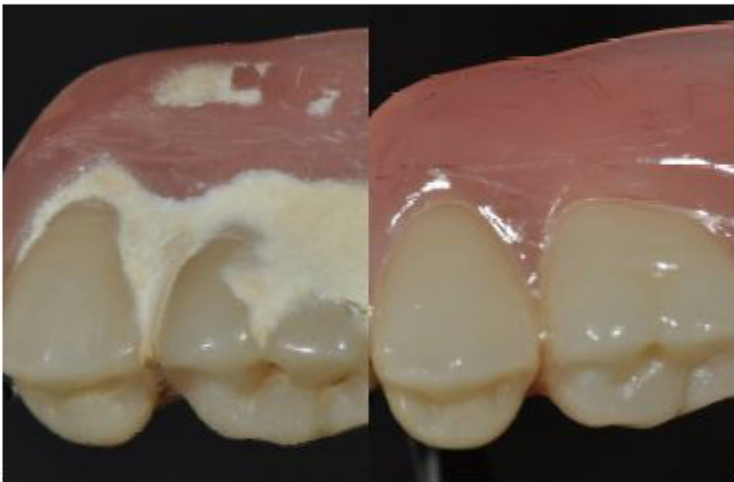

이상적인 화학작용

덴처 세척을 위한 적절한 용도별 세척액이 있습니다.

심프로 유니버설 세척액

심프로와 함께 사용하여 일반적인 오염물인 플라그, 치석, 치태, 변색 및 덴처 접착제 제거를 위해 사용합니다.

심프로 니코클린 세척액

덴처에 착색된 니코틴 얼룩을 제거할 때 사용합니다. 심프로와 사용하지 않고 세척 후 처리로써 니코클린 세척액에 덴처를 담가두는 형태로 사용합니다.

